

Triacid-N r.f.u. (ready for use)



gebrauchsfertiges, wässriges
Instrumentendesinfektionsmittel
speziell zur Desinfektion und
Reinigung kleinerer Instrumente

Anwendungsbereiche:

Triacid-N r.f.u. ist eine **aldehydfreie, gebrauchsfertige** Lösung zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten mit umfassendem Wirkungsspektrum und sehr guter Reinigungskraft. Als gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel lässt sich Triacid-N r.f.u. besonders angenehm und zeitsparend zur routinemäßigen Behandlung **kleiner Instrumente** unmittelbar nach deren Gebrauch einsetzen.

Das Produkt eignet sich hervorragend für den Gebrauch im **Dentalbereich** zur mehrfach täglichen Reinigung und Desinfektion der rotierenden Instrumente, Gummipolierer, Bürsten, etc. Ideal für die Anwendung im **Bohrerbad** – ohne Verfärbungen an den Schäften, ohne Anlösen der Gummipolierer. Sehr gut anzuwenden auch im Ultraschallbad.

Besondere Eigenschaften:

- einfach in der Handhabung
- wirtschaftlicher Einsatz aufgrund der Dosiergenauigkeit auch bei Kleinstmengen
- geeignet für den Einsatz im Bohrer- und Ultraschallbad
- gute Reinigungsleistung
- hohe Materialverträglichkeit
- frei von Aldehyden und Quats

Anwendung:

Instrumente für die empfohlene Einwirkzeit im geöffneten Zustand in die gebrauchsfertige Lösung einlegen. Auf eine vollständige Benetzung achten, Luftblasen vermeiden. Anschließend sorgfältig mit Wasser abspülen und trocknen. Bei starker Verschmutzung Instrumente vorher reinigen (z.B. mit Antiseptica Instrumenten-Reiniger flüssig oder Pulver).

Wirkungsspektrum:

- bakterizid, levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid**

Zusammensetzung (Wirkstoffe):

100 g enthalten:
0,54 g N-Dodecylpropan-1,3-diamin

Listung:

VAH - Liste

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Geruch: schwach
pH-Wert: ca. 8 bei 20 °C
Dichte: ca. 1 g/cm³ bei 20 °C
Flammpunkt: > 60 °C gem. DIN 51755

Lieferformen:

- 2 Kunststoff-kanister zu 5 L

Anwendungsempfehlung:

VAH ger. org. Belastung	konz. – 5 min.
tuberkulozid, mykobakterizid*	konz. – 5 min.
begrenzt viruzid** (inkl. HIV/HBV/HCV)	konz. – 15 min.
Vacciniavirus	konz. – 15 min.
BVDV	konz. – 5 min.

* gemäß Standardmethoden der DGHM, Stand 01.09.2001
** gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Das Präparat wird hergestellt in Übereinstimmung mit dem internationalen Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachberater oder auf unserer Homepage.

*Desinfektionsmittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.*

ANTISEPTICA



ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
Tel.: +49-2234-984 66-0, Fax: +49-2234-984 66-11
E-Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com



Qualitätsmanagement
nach Medizinprodukte
Richtlinie 93/42/EWG



Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008



Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach EN ISO
13485:2003 + AC:2007

ANTISEPTICA Austria GmbH
A-1020 Wien, Wehlstraße 150 / Haussteinstraße, Top 61
Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66
E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft